



Die Community Maske die passt

Hey cool, dass du dich für eine Community Maske von Petertools entschieden hast. Unsere Masken entstehen durch flinke Hände im schönen Bieler Seeland, aus feinsten Stoffen aus dem lauschigen Appenzell und der weltweit innovativsten antimikrobiellen Beschichtung aus dem umtriebigen Zürich. Einzig das elastische Faserband kommt aus einer Seilerei in Dornbirn. Zusammengefasst und verpackt werden die Masken von den fleissigen Mitarbeiter:innen der Stiftung Dammweg in Biel.

Unsere Maske zeichnet sich durch einige Besonderheiten aus

1. Sie entspricht den Vorgaben der Arbeitsgruppe **ReMask** und ist zu 100% aus **Oekotex®** zertifizierten Materialien hergestellt.
2. Die verarbeiteten Stoffe sind mit der antimikrobiellen Beschichtung **HeiQ Viroblock®** beschichtet, diese Beschichtung schützt das behandelte Produkt vor Mikroben und Keimen.
3. Sie lässt sich mit dem einseitig vernähten elastischen Faserband sehr einfach auf die **gewünschte Grösse einstellen**, so passt sie für Erwachsene und Kinder, zudem ist es schön weich.
4. Sie ist **Brillen-träger-freundlich** da sie an der Nase hochgeschnitten ist und so das Beschlagen der Gläser minimiert.
5. Die Passgenauigkeit erleichtert das **einhändige Anziehen**.

Innenseite

Mischgewebe aus 61% Baumwolle und 39% Lyocell für erhöhte Saugfähigkeit, dies verhindert die schnelle Durchfeuchtung.

Aussenseite

100% Baumwollgewebe, bei den weiss/weissen Masken zusätzlich mit wasserabweisender (hydrophober) Ausrüstung (Spraytest 80 nach EN DIN ISO 4920:2012).

Maskentyp

Diese Community Maske ist keine Atemschutzmaske (FFP1, FFP2 oder FFP3) gemäss der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und auch keine medizinische Gesichtsmaske gemäss der Medizinprodukteverordnung 93/42/EWG oder der Verordnung (EU) 2017/745. Diese textile Maske, die hauptsächlich auf eine Quellkontrolle abzielt, bietet einen ausreichenden Schutz gegen Flüssigkeitströpfchen unterschiedlicher Grösse, die beim Husten oder Niesen entstehen, sowie gegen Aerosole (Partikel bis zu 1 Mm).

Gebrauchsanweisung

1. Vor dem Erstgebrauch waschen bei 60° mit Vollwaschmittel.
2. Nach Einsatz der Maske diese vor dem nächsten Tragen bei 60° mit Vollwaschmittel waschen.
3. Die antimikrobielle Eigenschaft bleibt 30 Waschgänge erhalten.
4. Vor dem Entsorgen waschen und der Textilsammlung zuführen.

Anpassen der Maske

Stell die Passgenauigkeit mit den elastischen Faserbändern ein, so passt die Maske perfekt und schneidet bei langem Tragen nicht ein. Deine Ohren werden es dir danken.

Le masque Community pour tous

Ravi que vous ayez choisi un masque Community de Petertools ! Nos masques sont fabriqués par des mains agiles dans la jolie région du Bieler Seeland, avec les plus fins tissus de la charmante Appenzell et le revêtement antimicrobien le plus innovant au monde de l'active Zürich. Seul le ruban élastique provient d'une corderie de Dornbirn. Les masques sont assemblés et emballés par le personnel de la Fondation Dammweg à Bienna.

Notre masque se distingue par quelques particularités

1. Il est conforme aux spécifications du groupe de travail **ReMask** et est fabriqué à partir de matériaux certifiés Oekotex® à 100%.
2. Les matériaux qui le composent sont recouverts du revêtement antimicrobien **HeiQ Viroblock®**, ce revêtement protège le produit traité contre les microbes et les germes.
3. Il s'ajuste très facilement à la **taille souhaitée** grâce au ruban élastique cousu d'un côté, de telle sorte qu'il convient aux adultes et aux enfants, en outre, il est agréable et doux.
4. Il est également parfait pour les **porteurs de lunettes** car sa coupe est haute sur le nez et il permet ainsi de limiter la buée sur les verres.
5. Parfaitement ajusté, on peut le **resserrer d'une seule main**.

Intérieur

Tissu mélangé composé de 61 % de coton et 39 % de lyocell pour une meilleure absorption, ce qui évite une humidification rapide.

Extérieur

100 % coton, pour les masques blanc/blanc, avec en plus une finition hydrofuge (hydrophobe) (test de pulvérisation 80 selon EN DIN ISO 4920:2012).

Type de masque

Ce masque Community n'est pas un masque respiratoire (FFP1, FFP2 ou FFP3) selon le règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI, ni un masque facial médical selon la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux ou le règlement (UE) 2017 /745. Ce masque textile offre une protection suffisante contre les gouttelettes de liquide de différentes tailles, produites lorsqu'on tousse ou éternue, et contre les aérosols (particule jusqu'à 1 mm).

Mode d'emploi

1. Avant la première utilisation, laver à 60° avec une lessive ordinaire.
2. Après utilisation, laver le masque à 60° avec une lessive ordinaire avant de le porter de nouveau.
3. La propriété antimicrobienne est conservée 30 cycles de lavage.
4. Avant de le jeter, le laver et le mettre au rebut avec les textiles.

Ajustement du masque

Réglez le masque à l'aide des rubans élastiques, afin qu'il s'ajuste parfaitement et ne vous blesse pas lorsque vous le portez pendant longtemps. Vos oreilles vous en seront reconnaissantes !

HeiQ Viroblock: Diese Stofftechnologie schützt das Produkt vor Mikroben und Keimen. Enthält ein Biozid* auf Basis von recyceltem Silbersalz. *Wirkstoff: Reaktionsmasse von Titandioxid und Silberchlorid.

HeiQ Viroblock : Cette technologie de tissu protège le produit des microbes et des germes. Contient un biocide* à base de sel d'argent recyclé. *Ingrédient actif : masse réactionnelle du dioxyde de titane et du chlorure d'argent.


Mit dem Kauf dieser Maske unterstützt du die Stiftung



Avec l'achat de ce masque, vous soutenez la fondation

Drei mögliche Befestigungsarten


Mit elastischem Faserband hinter den Ohren
Nicht benötigte Laschen abschneiden

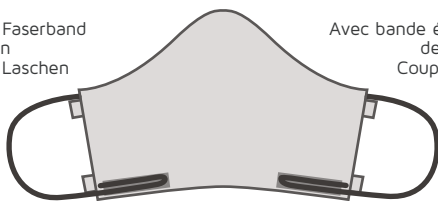


Länge einstellbar mit Klett, überstehendes Band ev. abschneiden

Trois types de fixation possibles

Avec bande élastique en fibre derrière les oreilles
Couper les languettes non utilisées

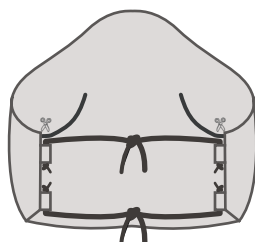

Longueur réglable par velcro, couper le ruban adhésif qui dépasse si nécessaire

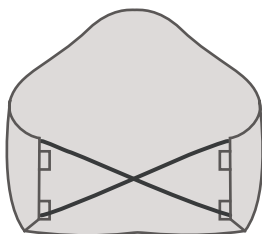

Mit elastischem Band hinter dem Kopf
Avec bande élastique derrière la tête

Mit Baumwollband verknötet hinter dem Kopf
Noué avec une bande de coton derrière la tête

**Bänder verfügbar in der Cyberboutique
Bänder erhältlich im Online-Shop
petertools.life**